


Управление креслом пациента

Панель управления		Сенсорный экран разблокирован. Нажмите для блокировки.	Сенсорный экран заблокирован. Нажмите и удерживайте, чтобы разблокировать.
Спинка вниз при удерживании нажатой кнопки		Спинка вверх при удерживании нажатой кнопки	
Кресло вниз при удерживании нажатой кнопки		Кресло вверх при удерживании нажатой кнопки	
Кресло в автоматическое положение			

Кнопка Flexy

Кресло в положение сплевывания



Педаль управления

Короткое нажатие

Длительное нажатие


Кресло в автоматическое положение C

Кресло вверх

C

Короткое нажатие

Длительное нажатие

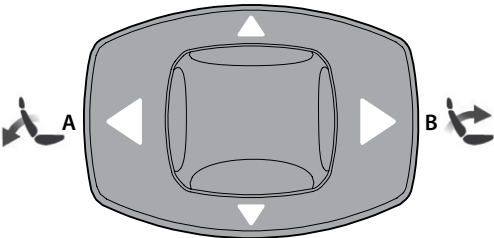

Короткое нажатие

Длительное нажатие


Кресло в автоматическое положение A

Спинка вниз

A

Короткое нажатие

Длительное нажатие



Короткое нажатие

Длительное нажатие


Кресло в автоматическое положение B

Спинка вверх

B

Короткое нажатие

Длительное нажатие



Короткое нажатие

Длительное нажатие


Кресло в автоматическое положение D


Кресло вниз

D

Короткое нажатие

Длительное нажатие



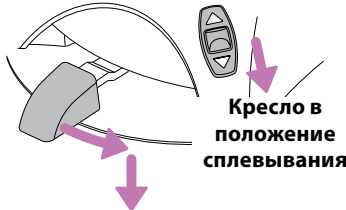

Кресло в положение сплевывания

Кресло в положение сплевывания

Управление стоматологической установкой

Панель управления



Сенсорный экран разблокирован.
Нажмите для блокировки.



Сенсорный экран заблокирован. Нажмите и удерживайте, чтобы разблокировать.

Наполнение стакана и смыв плевательницы

Короткое нажатие



Наполнение стакана при удерживании нажатой кнопки

Длительное нажатие

Смыв плевательницы

Короткое нажатие



Открытие двери / вызов ассистента в течение запрограммированного времени

Короткое нажатие



Открытие двери / вызов ассистента при удерживании кнопки нажатой

Длительное нажатие

Светильник ВКЛ ► ВЫКЛ

Короткое нажатие



Яркость светильника

Длительное нажатие

Режим работы с композитом ВКЛ ► ВЫКЛ

Короткое нажатие



Яркость светильника в режиме работы с композитом

Длительное нажатие

Запуск таймера



→ Выбор номера таймера

Процедура обслуживания



→ Выбор процедуры

Педаль управления

Не активирован инструмент

Короткое нажатие


Открытие двери / вызов ассистента в течение запрограммированного времени

Длительное нажатие

Открытие двери / вызов ассистента при удерживании кнопки нажатой

Запрограммированная функция установки

Запрограммированная функция установки

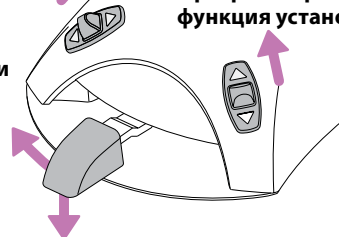
















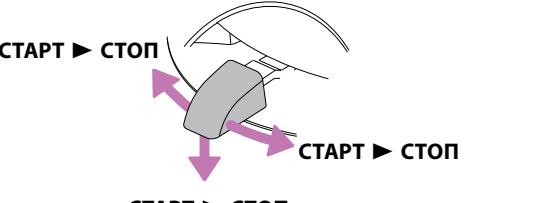


Короткое нажатие

Наполнение стакана и смыв плевательницы

Длительное нажатие

Наполнение стакана при удерживании нажатой кнопки

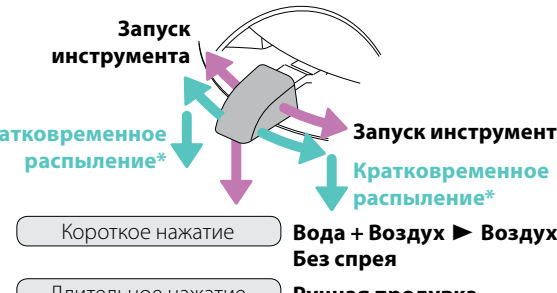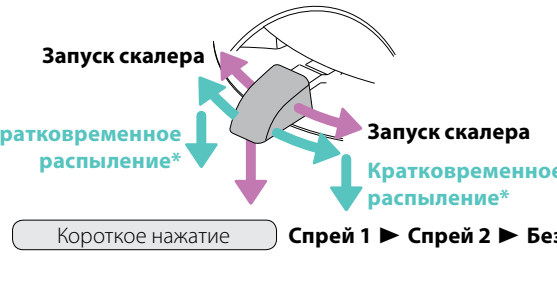Управление инструментами

Панель управления		Сенсорный экран разблокирован. Нажмите для блокировки.	Сенсорный экран заблокирован. Нажмите и удерживайте, чтобы разблокировать.
<p>Микромотор или турбинный наконечник</p> <p>Автоматическая продувка ВКЛ ► ВЫКЛ</p> 	<p>Микромотор, турбинный наконечник или скалер</p> <p>Лампа инструмента ВКЛ ► ВЫКЛ</p> 	<p>Микромотор или турбинный наконечник Вода + Воздух ► Воздух ► Без спрея</p> <p>Скалер Спрей 1 ► Спрей 2 ► Без спрея</p> 	
<p>Скалер</p> <p>Изменение режима работы</p> 	<p>Турбинный наконечник</p> <p>Понижение мощности ВКЛ ► ВЫКЛ</p> 	<p>Турбинный наконечник</p> <p>Быстрый запуск ВКЛ ► ВЫКЛ</p> 	
<p>Микромотор</p> <p>Реверс вращения ВКЛ ► ВЫКЛ</p> 	<p>Микромотор</p> <p>Ограничение скорости вращения ВКЛ ► ВЫКЛ</p> 	<p>Микромотор Bien-Air MX2</p> <p>Выбор предустановок</p> 	
<p>Микромоторы Bien-Air MX2 и Bien-Air MCX</p> <p>Ограничение крутящего момента ВКЛ ► ВЫКЛ</p> 	<p>Микромотор Bien-Air MX2</p> <p>Переключение режима при достижении ограничения крутящего момента</p> 	<p>Автостоп</p> <p>Автореверс</p> <p>Автопрокрутка</p> 	
Педаль управления		Активирован инструмент, управляемый установкой	
<p>Микромотор или турбинный наконечник (стандартная педаль)</p>  <p>Запуск инструмента</p> <p>Кратковременное распыление*</p> <p>Кратковременное распыление*</p> <p>Короткое нажатие: Вода + Воздух ► Воздух ► Без спрея</p> <p>Длительное нажатие: Ручная продувка</p>	<p>Скалер (стандартная педаль)</p>  <p>Запуск скалера</p> <p>Кратковременное распыление*</p> <p>Кратковременное распыление*</p> <p>Короткое нажатие: Спрей 1 ► Спрей 2 ► Без спрея</p>	*Если активировано техником	
<p>Микромотор, турбинный наконечник или скалер</p> <p>Запрограммированная функция инструмента**</p> 	<p>Полимеризационная лампа</p> <p>СТАРТ ► СТОП</p> <p>СТАРТ ► СТОП</p> <p>СТАРТ ► СТОП</p> 	**Может быть изменено специалистом по обслуживанию	
<p>Интраоральная камера</p> <p>Активировать/деактивировать интраоральную камеру (по умолчанию)</p> <p>Стоп-кадр ВКЛ ► Стоп-кадр ВЫКЛ</p> <p>Стоп-кадр ВКЛ ► Стоп-кадр ВЫКЛ</p> <p>Короткое нажатие: Сохранить изображение</p> 	<p>Интраоральный сканер</p> <p>Активировать/деактивировать интраоральный сканер*</p> <p>Сгенерировать модель</p> <p>Выбор режима сканирования</p> <p>Активировать/деактивировать интраоральный сканер*</p> <p>Выбор режима сканирования</p> <p>Короткое нажатие: Начать сканирование</p> <p>Длительное нажатие: Получить изображение</p> 	*Если активировано техником	

Управление моторизованным подголовником

Педаль управления


Короткое нажатие

Нормальный режим
ВКЛ ► ВЫКЛ



Длительное нажатие

Режим наклона
ВКЛ ► ВЫКЛ

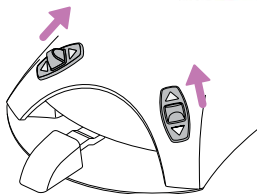

Нормальный режим

Удлинить подголовник



Режим наклона


Поднять подголовник

Нормальный режим

Анатомическое движение вниз

Режим наклона

Наклон подголовника назад

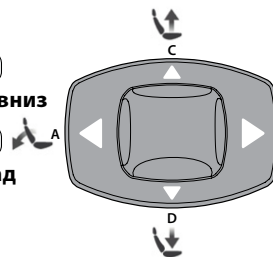

Нормальный режим

Анатомическое движение вверх

Режим наклона

Наклон подголовника вперед



Нормальный режим

Укоротить подголовник



Режим наклона

Опустить подголовник

Программирование

Панель управления

Сенсорный экран разблокирован. Нажмите для блокировки.

Сенсорный экран заблокирован. Нажмите и удерживайте, чтобы разблокировать.

Настройки автоматических положений кресла

Функция ВКЛ.

Функция ВЫКЛ.



Переместить кресло в необходимое положение.




Светильник ВКЛ/ВЫКЛ



Начать программирование



Нажать кнопку положения кресла

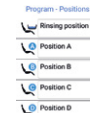

Выбрать автоматическое положение



Принять новое автоматическое положение

Настройки установки

Функция ВКЛ.

Функция ВЫКЛ.

Программирование выполняется в данной последовательности:



Начать программирование



Выбрать функцию



Отрегулировать значение




Принять новое значение

Настройки инструментов

Функция ВКЛ.

Функция ВЫКЛ.


Программирование выполняется в данной последовательности:

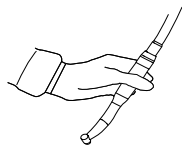

Активация инструмента



Начать программирование

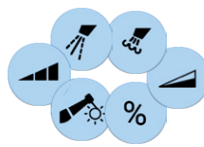

Выбрать функцию



Отрегулировать значение



Принять новое значение

Установка времени и даты

Функция ВКЛ.

Функция ВЫКЛ.



Начать программирование



Выберите время и дату



Выбрать функцию



12/24

Выберите формат



Отрегулировать значение



Принять новое значение

30017502_2/03.2019/ru