

Управление креслом пациента

Панель управления		Сенсорный экран разблокирован. Нажмите для блокировки.	Сенсорный экран заблокирован. Нажмите и удерживайте, чтобы разблокировать.
Спинка вниз при удерживании нажатой кнопки		Спинка вверх при удерживании нажатой кнопки	
Кресло вниз при удерживании нажатой кнопки		Кресло вверх при удерживании нажатой кнопки	
Кресло в автоматическое положение			
Кнопка Flexy			
Кресло в положение для посадки			
Педаль управления			
<p>Короткое нажатие</p> <p>Длительное нажатие</p>	<p>Кресло в автоматическое положение C</p> <p>Кресло вверх</p>	<p>Короткое нажатие</p> <p>Длительное нажатие</p>	<p>Кресло в автоматическое положение B</p> <p>Спинка вверх</p>
<p>Короткое нажатие</p> <p>Длительное нажатие</p>	<p>Кресло в автоматическое положение A</p> <p>Спинка вниз</p>	<p>Короткое нажатие</p> <p>Длительное нажатие</p>	<p>Кресло в автоматическое положение D</p> <p>Кресло вниз</p>
			<p>Кресло в положение для посадки</p> <p>Кресло в положение для посадки</p>

Поворот кресла пациента

Ножной выключатель

Нажать


Освободить фиксирующий механизм

Удерживать

Повернуть сиденье в любом направлении

Отпустить

Заблокировать сиденье в одном из фиксированных положений

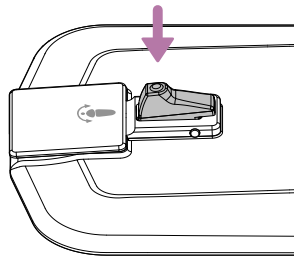

Управление стоматологической установкой

Панель управления



Сенсорный экран разблокирован. Нажмите для блокировки.



Сенсорный экран заблокирован. Нажмите и удерживайте, чтобы разблокировать.

Открытие двери / вызов ассистента в течение запрограммированного времени

Короткое нажатие



Открытие двери / вызов ассистента при удерживании кнопки нажатой

Длительное нажатие

Светильник ВКЛ ► ВЫКЛ

Короткое нажатие



Яркость светильника

Длительное нажатие

Режим работы с композитом ВКЛ ► ВЫКЛ

Короткое нажатие



Яркость светильника в режиме работы с композитом

Длительное нажатие

Запуск таймера



→ Выбор номера таймера

Процедура обслуживания



→ Выбор процедуры

Педали управления

Не активирован инструмент

Короткое нажатие


Открытие двери / вызов ассистента в течение запрограммированного времени

Длительное нажатие

Открытие двери / вызов ассистента при удерживании кнопки нажатой

Запрограммированная функция установки

Запрограммированная функция установки

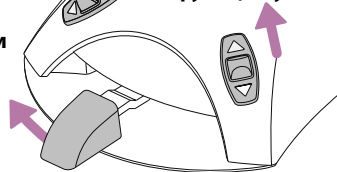

Управление инструментами

Панель управления		Сенсорный экран разблокирован. Нажмите для блокировки.	Сенсорный экран заблокирован. Нажмите и удерживайте, чтобы разблокировать.
Микромотор или турбинный наконечник Автоматическая продувка ВКЛ ► ВЫКЛ		Микромотор, турбинный наконечник или скалер Лампа инструмента ВКЛ ► ВЫКЛ	Микромотор или турбинный наконечник Вода + Воздух ► Воздух ► Без спрея Скалер Спрей 1 ► Спрей 2 ► Без спрея
Скалер Изменение режима работы		Турбинный наконечник Понижение мощности ВКЛ ► ВЫКЛ	Турбинный наконечник Быстрый запуск ВКЛ ► ВЫКЛ
Микромотор Реверс вращения ВКЛ ► ВЫКЛ		Микромотор Ограничение скорости вращения ВКЛ ► ВЫКЛ	Микромотор Bien-Air MX2 Выбор предустановок
Микромоторы Bien-Air MX2 и Bien-Air MCX Ограничение крутящего момента ВКЛ ► ВЫКЛ		Микромотор Bien-Air MX2 Переключение режима при достижении ограничения крутящего момента	Автостоп ► Автореверс ► Автопрокрутка
Педаль управления Активирован инструмент, управляемый установкой			
Микромотор или турбинный наконечник (стандартная педаль)	Скалер (стандартная педаль)		
<p>Запуск инструмента</p> <p>Кратковременное распыление*</p> <p>Кратковременное распыление*</p> <p>Запуск инструмента</p> <p>Кратковременное распыление*</p> <p>Кратковременное распыление*</p> <p>Короткое нажатие: Вода + Воздух ► Воздух ► Без спрея</p> <p>Длительное нажатие: Ручная продувка</p>	<p>Запуск скалера</p> <p>Кратковременное распыление*</p> <p>Кратковременное распыление*</p> <p>Запуск скалера</p> <p>Кратковременное распыление*</p> <p>Кратковременное распыление*</p> <p>Короткое нажатие: Спрей 1 ► Спрей 2 ► Без спрея</p>		
<small>*Если активировано техником</small>			
Микромотор, турбинный наконечник или скалер	Полимеризационная лампа		
<p>Запрограммированная функция инструмента**</p>	<p>СТАРТ ► СТОП</p> <p>СТАРТ ► СТОП</p> <p>СТАРТ ► СТОП</p>		
<small>**Может быть изменено специалистом по обслуживанию</small>			
Интраоральная камера	Интраоральный сканер		
<p>Активировать/деактивировать интраоральную камеру (по умолчанию)</p> <p>Стоп-кадр ВКЛ ► Стоп-кадр ВЫКЛ</p> <p>Стоп-кадр ВКЛ ► Стоп-кадр ВЫКЛ</p> <p>Короткое нажатие: Сохранить изображение</p>	<p>Активировать/деактивировать интраоральный сканер*</p> <p>Сгенерировать модель</p> <p>Выбор режима сканирования</p> <p>Активировать/деактивировать интраоральный сканер*</p> <p>Выбор режима сканирования</p> <p>Короткое нажатие: Начать сканирование</p> <p>Длительное нажатие: Получить изображение</p>		
<small>*Если активировано техником</small>			

Программирование

Панель управления



Сенсорный экран разблокирован. Нажмите для блокировки.



Сенсорный экран заблокирован. Нажмите и удерживайте, чтобы разблокировать.

Настройки автоматических положений кресла



Функция ВКЛ.



Функция ВЫКЛ.



Переместить кресло в необходимое положение.




Светильник ВКЛ/ВЫКЛ



Начать программирование



Нажать кнопку положения кресла

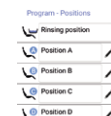

Выбрать автоматическое положение



Принять новое автоматическое положение

Настройки установки



Функция ВКЛ.



Функция ВЫКЛ.

Программирование выполняется в данной последовательности:



Начать программирование



Выбрать функцию



Отрегулировать значение



Принять новое значение

Настройки инструментов




Функция ВКЛ.



Функция ВЫКЛ.

Программирование выполняется в данной последовательности:

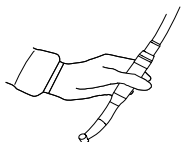

Активация инструмента



Начать программирование



Выбрать функцию



Отрегулировать значение



Принять новое значение

Установка времени и даты



Функция ВКЛ.



Функция ВЫКЛ.




Начать программирование



Выберите время и дату



Выбрать функцию

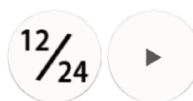

Выберите формат



Отрегулировать значение



Принять новое значение