


# Краткое руководство


## Подготовка


### Программное обеспечение Planmeca Romexis®


❶ Выберите "Интраоральный снимок" в 2D модуле программы Planmeca Romexis.

#### ✕ Получить новую рентгенограмму

 Панорамный снимок  
Получить новое изображение

 Цефалометрический снимок  
Получить новое изображение

 Интраоральный снимок с исследованием  
Получить новое изображение

 Интраоральный снимок  
Получить новое изображение


 Интраоральный снимок на фосфорной пластине  
Получить новое изображение

### Planmeca ProSensor®


❷ Выберите необходимый размер датчика в соответствии с типом съёмки и размером пациента.

❸ Наденьте защитный чехол на датчик и установите его в подходящий держатель.

❷

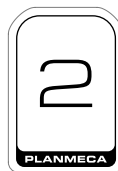

❸

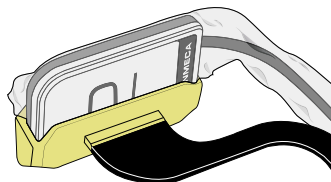


## Позиционирование пациента и датчика

❶ Попросите пациента присесть на стул.

❷ Установите датчик в полости рта пациента.

❸ Выберите необходимый угол наклона рентгеновской трубки для экспозиции.

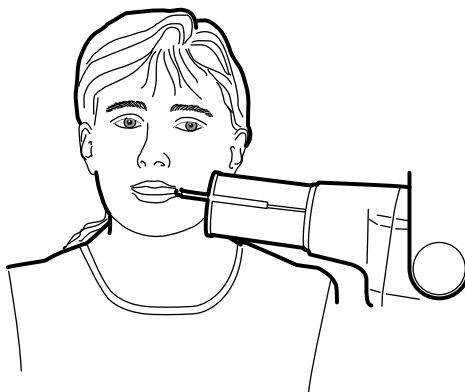

❹ На пульте рентгеновского аппарата установите необходимые параметры экспозиции.

63

kV

8


mA

0.100

s


# Получение интраорального снимка

❶ Нажмите и удерживайте кнопку экспозиции на пульте управления рентгеновского аппарата.

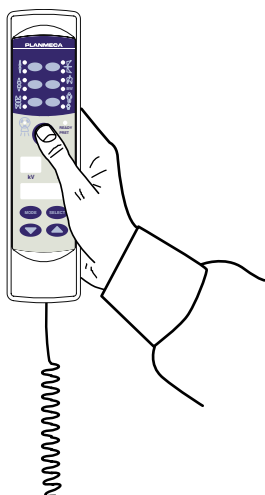

❷ Полученный снимок отобразится на мониторе компьютера.

❸ Укажите номер зуба и расположение датчика. Нажмите кнопку "Save" (Сохранить).

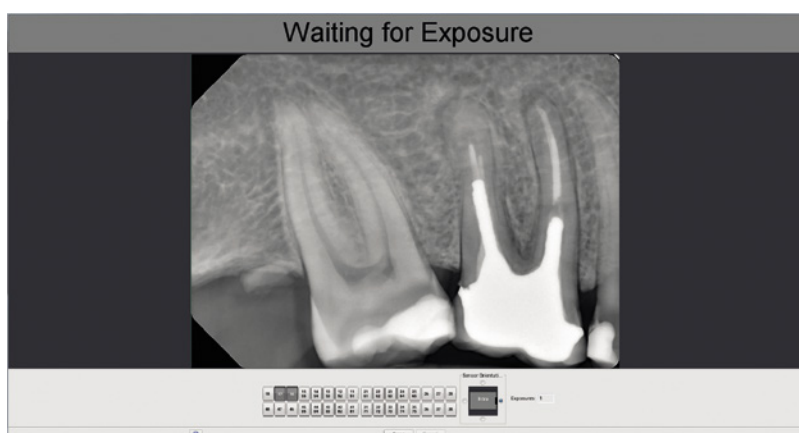

❹ По окончании съёмки уберите датчик из полости рта пациента.